

WIE SEHEN DIE ERGEBNISSE MIT ULTHERAPY® AUS?

FRISCHERE AUSSTRAHLUNG DURCH ANGEHOBENE AUGENBRAUEN



Vorher



Nach 120 Tagen



Vorher




Nach 450 Tagen

JÜNGERES AUSSEHEN DURCH EINE GESTRAFFTE GESICHTSFORM IM KINN-HALSBEREICH



Vorher

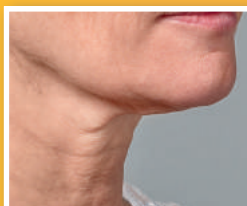

Nach 165 Tagen




Vorher




Nach 120 Tagen


NATÜRLICHE LIFTING-EFFEKTE IM HALSBEREICH

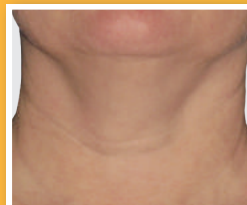


Vorher

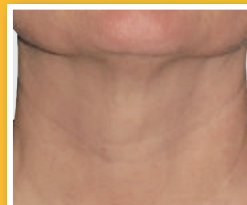

Nach 180 Tagen

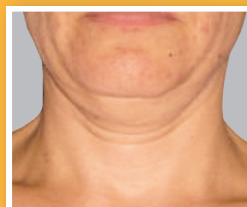

Vorher

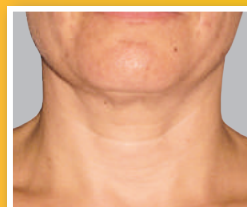

Nach 180 Tagen

VERJÜNGTES DEKOLLETEE DURCH GLÄTTUNG DER FALTEN



Vorher



Nach 180 Tagen



Vorher



Nach 360 Tagen

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ÜBER ULTHERAPY®

Wie funktioniert die Ultherapy®-Behandlung genau?

Ein glatter Ultraschallkopf wird über die Haut geführt und erzeugt ein Bild auf dem Monitor, mit dem der behandelnde Arzt genau planen kann, wo die Ultraschallenergie im Gewebe freigesetzt werden soll (patentierter Visualisierung). Mit demselben Ultraschallkopf kann dann fokussierte Ultraschallenergie in die vorgesehenen Gewebeschichten abgegeben werden, um die gewünschten Straffungseffekte zu generieren. Als Reaktion auf diese Energie wird in Ihrer Haut die Neubildung von Kollagen angeregt. Die Haut wird nach und nach fester und straffer. Es entsteht ein natürlicher Lifting-Effekt.

Ist Ultherapy® ein chirurgisches Verfahren?

Nein. Im Gegensatz zu einem Facelifting oder anderen invasiven Lösungen ist Ultherapy® ein nicht invasives Verfahren, das die unteren Hautschichten erreicht, ohne zu schneiden oder die Hautoberfläche zu verletzen.

Kann Ultherapy® ein Facelift ersetzen?

Ultherapy® hat sich als wirkungsvolle Alternative für all diejenigen erwiesen, die zu einer chirurgischen und operativen Behandlung nicht bereit sind.

Ist Ultherapy® sicher?

Ultraschallenergie wird seit mehr als 50 Jahren erfolgreich in der medizinischen Diagnostik und Therapie eingesetzt. Zahlreiche klinische Studien haben die gute Verträglichkeit von Ultherapy® bestätigt.

Wie lange dauert eine Ultherapy®-Behandlung?

Eine Behandlung dauert 30 – 90 Minuten, abhängig von dem zu behandelnden Bereich.

Wann wird das Ergebnis sichtbar?

Mit nur einer Behandlung wird bereits der Regenerationsprozess in Gang gesetzt. Dieser Erneuerungsprozess, bei dem neues, frisches Kollagen aufgebaut wird, dauert mehrere Monate. In der Regel ist das finale Ergebnis nach 6 Monaten zu sehen.

Wie lange hält das Ergebnis an?

Patienten profitieren, abhängig von ihrem Alter und den individuellen Alterungsprozessen, über einen längeren Zeitraum von einer Ultherapy®-Behandlung. Zukünftige Auffrischungsbehandlungen können dabei helfen, mit der individuellen Hautalterung Schritt zu halten.

Gibt es Ausfallzeiten?

Ultherapy® ist ein nicht invasives Verfahren, somit gibt es keine Ausfallzeiten. Sie können direkt nach der Behandlung wieder Ihren gewohnten Aktivitäten nachgehen.

Wie fühlt sich die Behandlung mit Ultherapy® an?

Durch die Abgabe der mikrofokussierten Ultraschallenergie werden in den gewünschten Gewebeschichten kleinste thermale Koagulationspunkte gesetzt, was Sie als eine vorübergehende Wärmeentwicklung wahrnehmen können. Jeder Patient wird die Intensität dieser Behandlung individuell empfinden. Ihr Arzt wird, wenn gewünscht, Maßnahmen ergreifen, damit die Behandlung so angenehm wie möglich für Sie ist. Die Patienten fühlen sich nach der Behandlung normalerweise gut und freuen sich auf die zu erwartenden Ergebnisse.

Gibt es Nebenwirkungen?

Normalerweise bemerken Sie direkt nach der Behandlung eine leichte Rötung des behandelten Areals, diese sollte aber bereits nach wenigen Stunden abklingen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach der Behandlung für ein paar Tage leichte Schwellungen auftreten, oder die Haut einige Wochen berührungsempfindlich erscheint oder ein leichtes Prickeln zu verspüren ist. Selten kann es auch zu vorübergehenden Nebenwirkungen wie kleinen blauen Flecken oder einem lokalen Taubheitsgefühl kommen, die Ihr Arzt dann aber mit Ihnen nachbeobachten wird. Sprechen Sie hierzu auch Ihren behandelnden Arzt an, er wird Sie darüber aufklären.

MERZ AESTHETICS



Ultherapy®
straffere Haut ohne OP

Ultherapy®
DAS ULTRASCHALL-LIFTING



WAS GENAU IST ULTHERAPY®?

Ultherapy® ist das Ultraschall-Lifting mit Visualisierung von Merz Aesthetics.

Für eine nachhaltige Hautstraffung im Gesicht, am Hals und im Bereich des Dekolletees – ganz ohne OP und ohne Schädigung der Hautoberfläche.

Die perfekte Lösung für alle, die sich keine Ausfallzeiten leisten können, ein chirurgisches Facelift ablehnen oder sich ganz natürliche Ergebnisse wünschen.

Durch das patentierte Visualisierungsverfahren ist Ultherapy® besonders sicher. Ultraschall-Bildgebung und -Behandlung erfolgen gleichzeitig – ideal für die Erstellung optimaler Behandlungspläne durch den Ästhetik-Spezialisten.

Ultherapy® ist das einzige nicht invasive Lifting-Verfahren mittels mikrofokussierten Ultraschalls mit FDA-Zulassung* und bietet Lifting-Effekte mit natürlichem Ergebnis bereits nach nur einer Behandlung!

SO WIRKT ULTHERAPY®

Mit dem Altern lässt der Kollagen- und Elastingehalt der Haut nach – das Gewebe wird zunehmend schlaff und verliert an Festigkeit. Typische Anzeichen sind z. B.:

- erschlaffte Haut im Gesicht und an den Augen
- Faltenbildung auf dem Dekolletee
- Konturenverluste an Kinn und Hals

Ultherapy® kann dabei helfen, die Zeichen der Zeit aufzuhalten, und wirkt von innen nach außen, um die Haut zu straffen und zu liften. Mikrofokussierte Ultraschall-Energie passiert das Hautgewebe ohne es zu verletzen und wirkt in einer Tiefe von bis zu 4,5 mm. Dies ist die Gewebeschicht, die typischerweise bei einem chirurgischen Facelift gestrafft wird.

Die Haut reagiert auf diesen Stimulus mit der Neubildung von frischem Kollagen und Elastin.

Die Resultate werden schrittweise sichtbar und begeistern durch ein jüngeres und konturiertes Aussehen. Nach 6 Monaten ist in der Regel das finale Ergebnis zu sehen.


Das innovative Verfahren zur Hautstraffung wurde bereits mehrfach international ausgezeichnet.



WIE FUNKTIONIERT ULTHERAPY®?


1

VORHER

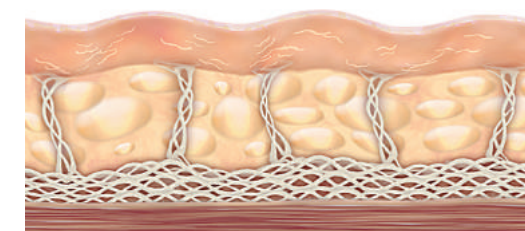

Erschlaffte Kollagenfasern


2

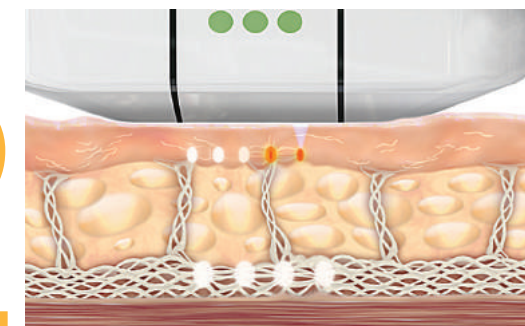

Tiefenwirkung durch Ultherapy®

3

NACHHER

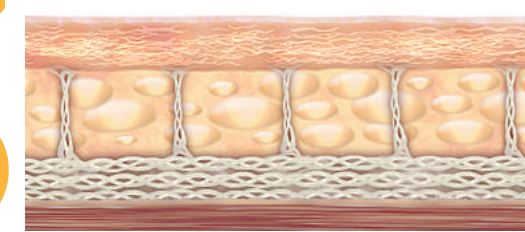

Lifting-Effekt nach ca. 6 Monaten

ULTHERAPY® – DAS ULTRASCHALL-LIFTING ZUR HAUTSTRAFFUNG

- Straffere Haut ohne OP
- Keine Ausfallzeiten
- Natürliche, langanhaltende Ergebnisse
- Sicherheit durch Visualisierung
- Zugelassen durch die FDA*

Weitere Informationen auch unter:
www.ultherapy.de

* Die FDA hat den Schutz der öffentlichen Gesundheit zur Aufgabe. Sie kontrolliert die Sicherheit und Wirksamkeit des zugelassenen Produktes. Die FDA-Zulassung gilt nur für den amerikanischen Markt bzw. in Ländern, die dem amerikanischen Rechtsraum unterliegen. In Europa greift die CE-Zertifizierung.

Praxisstempel

 FINDEN SIE UNS
AUF FACEBOOK.

www.facebook.com/Ultherapy.Ultraschalllifting

Merz Pharmaceuticals GmbH
Geschäftsbereich Merz Aesthetics
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
www.merz-aesthetics.info | www.ultherapy.de